
Instructions for Use

- Impression cap

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

교정에 필요한 밴드, 고무 고리 등의 교정기구

[사용방법]**1. 사용 전 준비 사항**

- ① 수술 시에 필요한 각종 기구와 재료를 준비한다.
- ② 사용전 사용자가 제품을 멸균 후 사용한다.

(멸균조건 : 고압증기멸균 Autoclave / 132°C, 15분)

2. 사용 방법

- ① 환자 구강내의 치과교정용고정장치와 결합될 Wire의 형상을 확인하기 위하여 Impression cap을 결합한다.
- ② Cast resin으로 식립된 구강형상을 채득한 후 분리한다.
- ③ Impression Cap에 Replica Screw를 연결 후 Cast resin을 이용하여 채득된 구강형상을 채득하여 Cast Regin에 구강내 치과교정용고정장치의 위치를 재현한다.
- ④ 재현된 Cast Regin으로 결합되는 Wire의 형상을 확인 및 Prebending한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 보관 시 실온의 건조한 곳에서 보관한다.
- ② 일회용 의료기기로 재사용하지 않는다.

[사용시 주의사항]

- 사용하기 전 제품의 상태를 확인한다.
- 사용 전 제품이 멸균되어 있는지 반드시 확인한 후, 사용해야 한다.

[유효기간] 해당사항 없음

[저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

[본 제품은 일회용 비멸균 의료기기임.]